


Snabbreferensguide

Pro Focus 2202 Färg



we specialize because you do



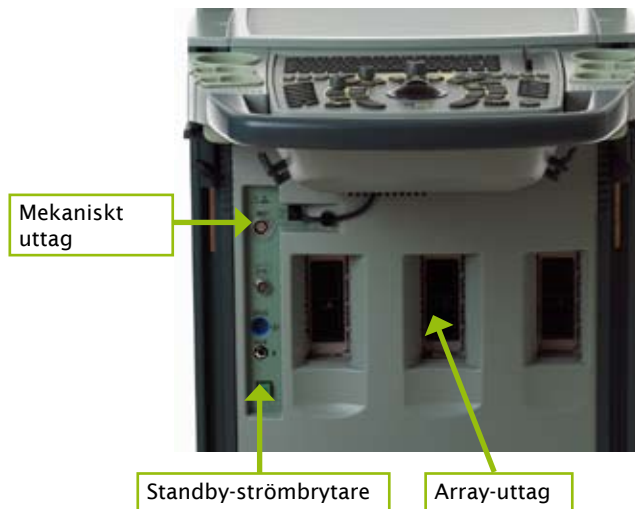

Slå på och av scannern

Använd den gröna standby-strömbrytaren.

För att slå på scannern:

- Tryck EN GÅNG. Vänta tills startskärmen försvinner. Scannern är klar att användas.

För att stänga av scannern:

- Kontrollera att scannern är i gång. Tryck på standby-strömbrytaren EN GÅNG.

laktta försiktighet: Koppla ***aldrig*** ur scannern från vägguttaget när den är i gång! Stäng av scannern och vänta tills strömbrytarlampan slutar lysa innan du kopplar ur den.

Anslut transducers

Arraytransducers

För att ansluta:

1. Sätt in transducerns kontakt i uttaget.
2. Vrid låshandtaget på transducern medurs.

För att koppla från:

1. Vrid låshandtaget på transducern moturs.
2. Ta ur kontakten från uttaget.

Mekaniska transducers

För att ansluta:


1. Rikta in det röda märket på kontakten mot den röda punkten på transduceruttaget.
2. Sätt in kontakten i uttaget.

För att koppla från:

1. Dra kontaktens låsmekanism (stoppring) bakåt
2. Ta ur kontakten från uttaget.

Skriv in patientinformation

1. Tryck på [👤 ID]. Patientfönster öppnas.



Date	Time	Name	Birth Date	ID	Sex	Description	Mo
------	------	------	------------	----	-----	-------------	----

Last: First: Mid:

Patient ID:

Keep image settings

Edit OK Cancel

2. Skriv in patientdata. Använd tab-tangenten för att gå från ett fält till ett annat.
3. Klicka på **OK**.

Välj Pro Package och Transducer Preset (diagnostisk inställning)

1. Tryck på [👤].



Surgery	2050 H	10.0-16.0 MHz
---------	--------	---------------

Anal-1


Anal-2

Rectal-1

Rectal-2

Close

2. Välj Pro Package och diagnostisk inställning.
3. Klicka på **Stäng**.

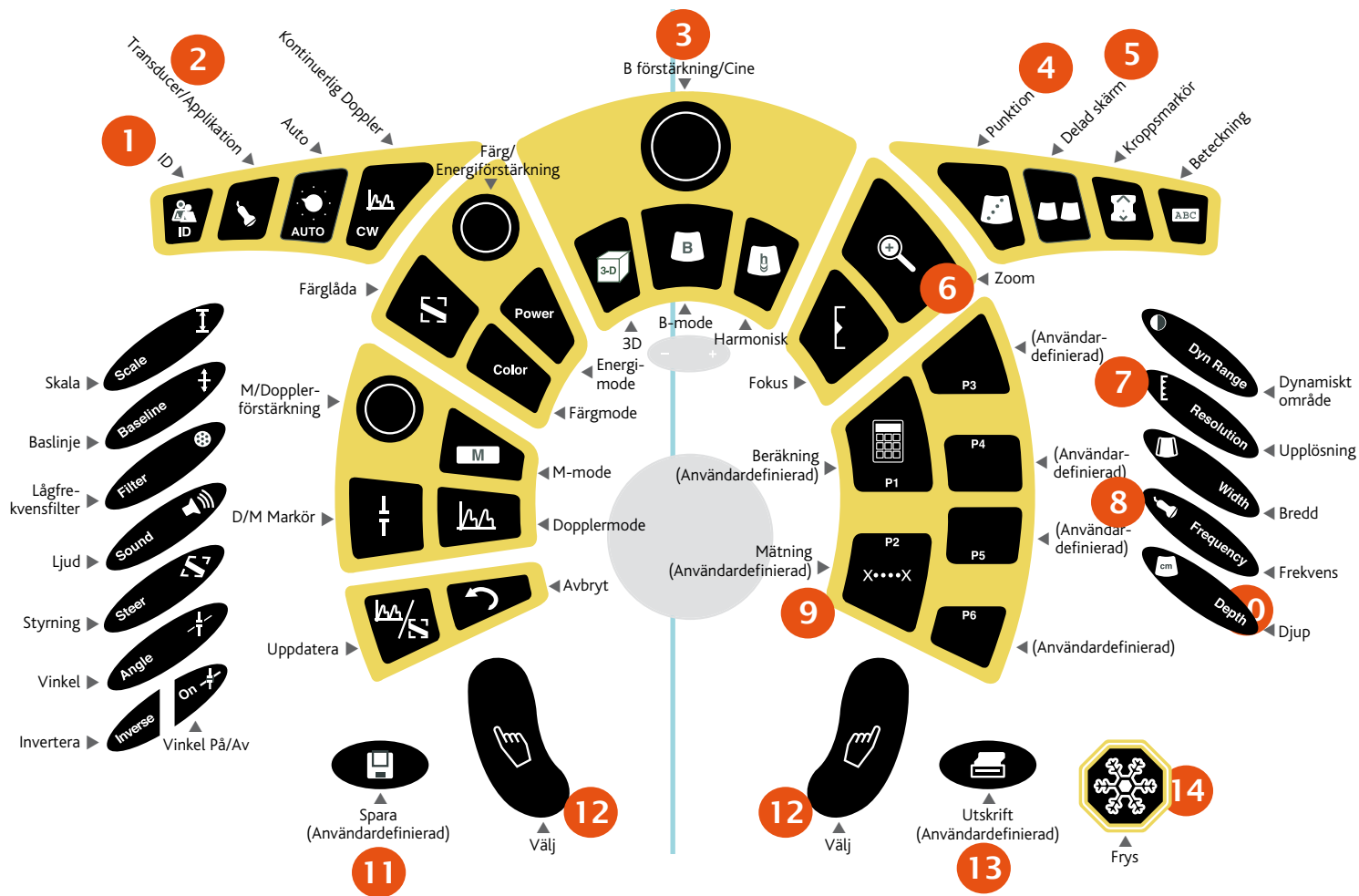

Tangenter som används ofta

1. **ID:** Öppnar patientfönster för att starta undersökning.
2. **Transducer/applikation:** Tryck för att välja Pro Package eller diagnostisk inställning.
3. **Förstärkning:** Ljusare/mörkare.
4. **Punktion:** Aktiverar punktionslinjer/brakymatris.
5. **Samtidig/delad skärm.**
Aktiverar samtidig undersökning.
Visar 2 skärmar.
6. **Zoom:** Slår på zoomrutan. Tryck igen för att zooma in. Ett tredje tryck återställer zoomområdet. Ett långt tryck stänger av zoomen om den är på.


Fungerar i både rörlig och fryst bild.
7. **Upplösning:** Ökar upplösningen (minskar scannerbildhastigheten) eller vice versa i B-läge eller färgläge.
8. **Frekvens:** Ändrar MHz.
9. **Grundmått:** Aktiverar markörer för grundmått.
10. **Djup:** Ändrar maxdjup (avstånd från transducer). Tryck på + för att förstora ett objekt och på - för att förminska det.
11. **Spara:** Lagrar bilden på hårddisken.
12. **Välj/Klicka:** Tryck för att välja alternativ.
13. **Skriv ut:** Skickar bilden till skrivaren.
14. **Aktivera frysfunktion/
inaktivera frysfunktion**

Se undersökning


Använd dokumentläsaren längst ner på skärmen.



1. Klicka på **Se undersökning**. Miniaturbilder av sparade stillbilder, rörliga sekvenser och rapportsidor visas i bildlistan.
2. Peka på dokumentet som du vill se.

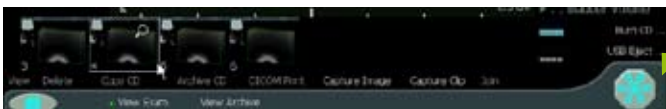

En ikon med ett förstöringsglas visas i det övre högra hörnet av miniaturbilden.

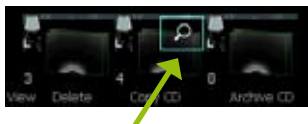

3. Klicka på förstöringsglaset. Den lilla ramen runt det blir blå. Dokumentet visas i scanningsområdet.

Kopiera till USB sticka

Bilder kopieras till flash-enheter direkt.

1. Sätt in flash-enhet i USB-porten.
2. Klicka på varje bild som ska kopieras. Ramen runt bilden blir blå.
3. Klicka på **Kopiera flash** eller **Kopiera -ID Flash**.

(Om det kopieringsalternativ du önskar inte visas, pekar du på triangeln och pekar på det kopieringsalternativ du önskar, i den lista som nu visas.)



4. Klicka på **USB Eject** för att avlägsna flash-enhet.

Kopiera till CD


När du klickar på **Kopiera CD**, kopieras **INTE** de valda bilderna direkt till en CD. De kopieras till en samlingsplats.

För att kopiera:


1. Klicka på varje bild som ska kopieras. Ramen runt bilden blir blå.
2. Klicka på **Kopiera CD** eller **Kopiera -ID CD**.
(Om det kopieringsalternativ du önskar inte visas, pekar du på triangeln och pekar på det kopieringsalternativ du önskar, i den lista som nu visas.)



3. Sätt in en CD i CD-enheten.

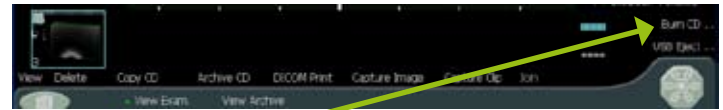

4. Klicka på **Bränn CD**.

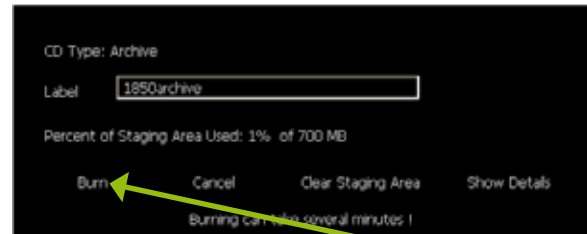

5. Namnge (etikettera) CD:n och klicka på **Bränn**.

P Snabbtangenter

P1:

P2: Grundmått

P3:

P4:

P5:

P6:



F Snabbtangenter

F1:

F2:

F3:

F4:

F5:

F6:

F7:

F8: Rapport

F9:

F10: Lägg till pekpil till bild

Dina anteckningar

Snabbreferensguiden är inte en fullständig användarinstruktion. Innan du använder scannern måste du läsa *Pro Focus 2202-användarinstruktion*. Den innehåller information som är viktig för säkerhet och för att undvika skada på utrustningen.



World Headquarters
Mileparken 34
DK-2730 Herlev
Danmark

Tel: (45) 44 52 81 00 · Fax: (45) 44 52 81 99 · www.bkmed.com

Med mer än 30 år av engagemang i ultraljudsinnovation, specialiserar sig B-K Medical på utveckling, tillverkning och distribution av avpassade ultraljudslösningar. B-K Medicals huvudkontor ligger nära Köpenhamn, Danmark, och vi har kontor och distributörer över hela världen.

Ett helägt dotterbolag till Analogic Corporation

Din lokala representant

Representerat i

Argentina · Australien · Österrike · Bangladesh · Belgien · Bolivia · Brasilien · Bulgarien · Kanada · Chile · Kina · Colombia · Costa Rica · Kroatien · Tjeckien · Danmark · Ecuador · Egypten · Estland · Finland · Frankrike · Tyskland · Ghana · Grekland · Guatemala · Hong Kong · Ungern · Island · Indien · Indonesien · Iran · Irak · Irland · Israel · Italien · Japan · Jordanien · Kazakstan · Korea · Kuwait · Lettland · Libanon · Litauen · Luxemburg · Malaysia · Malta · Nederländerna · Nya Zeeland · Norge · Pakistan · Peru · Filippinerna · Polen · Portugal · Rumänien · Ryssland · Saudiarabien · Serbien & Montenegro · Singapore · Slovakien · Slovenien · Sydafrika Afrika · Spanien · Sverige · Schweiz · Syrien · Taiwan · Thailand · Tunisien · Turkiet · Ukraina · Förenade Arabemiraten · Storbritannien · Uruguay · USA · Venezuela · Vietnam